



MULTIGEL, a 1ª em gel para procedimento medicinal

MEMBRANA ANTICONGELANTE ULTRA PROTECTION

Reg. M.S. ANVISA 80316110006

Ultra Protection Membrana Anticongelante é utilizada em tratamentos de Criolipólise. É compatível com todos os equipamentos e foi aprovada em rigorosos testes para provar sua segurança e eficácia, garantindo um procedimento seguro.

Modo de usar: Abra a embalagem no local indicado, retire a membrana **Ultra Protection** e desfaça as dobraduras. Aplique na região a ser tratada, certificando-se de que o manípulo do equipamento está devidamente centralizado na membrana, sem nenhum contato com a pele e inicie o procedimento.

Atenção: Uso profissional. Não reutilizar. Proibido cortar.

Composição: Aqua, Sorbitol, Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Glycerin, Propanediol, Hydroxyethylcellulose, Methylisothiazolinone / Methylchlorisothiazolinone.

Validade: 03 anos.

Importante: Conserve *Ultra Protection Membrana Anticongelante* em local fresco ao abrigo de luz intensa.

Apresentação em Embalagens: 01 lenço com gel especial – 30x38cm / 01 lenço com gel especial – 10x9cm

MultiGel Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos para Saúde Ltda.

Rua Francisco Andrade, 111 – CEP: 37589-000 – Silvianópolis - MG.

Tel.: + 55 (35) 3451-1010

CNPJ: 49.604.226/0001-90 – Indústria Brasileira

sac@multigel.com.br – Sac + 55 (35) 3451-1344

Resp. Técnico: Nívia Freitas Nascimento – CRF MG: 26042

